


Écoutez bien ça! **Allerject**[®] est arrivé


Épinéphrine Injectable, USP

ALLERJECT[®] est un auto-injecteur portatif d'épinéphrine avec assistant vocal intégré, conçu pour être facile à utiliser en cas de réaction allergique nécessitant un traitement d'urgence.

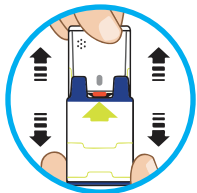

1^{RE} ÉTAPE | Sortez l'appareil ALLERJECT de l'étui.


Ne passez pas à la 2^e étape avant d'être prêt à utiliser ALLERJECT. Si vous n'êtes pas prêt à l'utiliser, remettez-le dans l'étui.

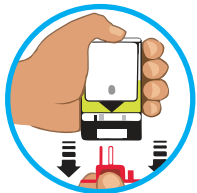

2^E ÉTAPE | Enlevez le dispositif de sécurité rouge.

Le dispositif de sécurité est conçu pour être résistant. *Tirez fermement pour l'enlever.*

Afin de réduire les risques de vous faire une injection accidentellement, ne touchez pas la base noire de l'auto-injecteur (l'endroit où l'aiguille sort). Si une injection accidentelle survient, recherchez immédiatement des soins médicaux.

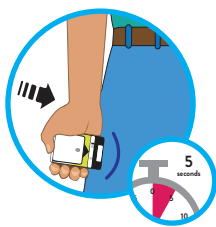

3^E ÉTAPE | Placez l'extrémité noire sur le milieu de la cuisse extérieure (sur les vêtements au besoin), puis appuyez fermement et tenez l'appareil en place pendant cinq secondes.

Faites l'injection uniquement au milieu de la cuisse extérieure (haut de la jambe). Ne faites pas d'injection à un autre endroit. Si vous administrez ALLERJECT à un jeune enfant, tenez sa jambe fermement en place pendant l'injection.

ALLERJECT émet un son de déclic et de sifflement lorsque vous l'appuyez sur votre cuisse. Ceci est normal et signifie qu'ALLERJECT fonctionne correctement.



4^E ÉTAPE | Recherchez immédiatement des soins médicaux ou rendez-vous à l'hôpital.

Remplacez l'appareil ALLERJECT dans l'étui et apportez-le à votre médecin ou pharmacien pour vous en défaire adéquatement et en obtenir un autre.

ALLERJECT est offert en deux concentrations



ALLERJECT 0,15 mg
Pour enfants de 15 à 30 kg

ALLERJECT 0,3 mg
Pour toute personne de 30 kg ou plus

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour discuter des options de traitement pour l'anaphylaxie et pour déterminer si ALLERJECT vous convient. Veuillez toujours lire le dépliant d'information pour le patient qui accompagne votre appareil ALLERJECT pour connaître les mises en garde et précautions, les effets secondaires et les renseignements sur le dosage et l'administration.

Apprenez-en plus à Allerject.ca

Renseignements concernant la sécurité

ALLERJECT est conçu pour le traitement d'urgence de réactions allergiques graves (anaphylaxie) et est destiné aux personnes qui présentent un risque accru ou qui ont des antécédents de réactions allergiques graves (anaphylaxie).

ALLERJECT doit être utilisé immédiatement pour vous traiter, ou traiter votre enfant, en cas de réactions allergiques graves. Il s'agit d'un traitement d'urgence. Il ne remplace pas la consultation d'un médecin ou une visite à l'hôpital. Après l'injection, recherchez immédiatement des soins médicaux. Même si vous avez reçu des soins médicaux, vous devez demeurer à proximité d'un hôpital ou d'un endroit où vous pouvez facilement appeler le 911 pendant les 48 heures qui suivent.